

LANSINOH COMPACT ELEKTRILINE RINNAPUMP
KASUTUSJUHEND
EESTI KEELNE

Olulised ohutusmeetmed:

Lansinoh® kompaktne üksik elektriline rinnapump on isiklik hügieenitarve ja hügieenilistel põhjustel ei tohiks seda kunagi jagada teiste emadega või müüa ühelt emalt edasi teisele. Eelnevalt mainitud toimingud tühistavad garantii.

Kui Te põete järgnevaid haigusi: Hepatiit B, hepatiit C või inimese immuunpuudulikkuse viirust (HIV), siis peate oleme teadlikud, et rinnapiima pumpamisel, kasutades Lansinoh®kompaktset elektrilist rinnapumpa, ei vähenda või eemalda Te viiruse ülekandmise riski lapsele rinnapiima kaudu.

Laste juuresolekul peaksite elektriliste toodete kasutamisel alati järgima põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevat:

Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised:

Oht: Vähendamaks elektrilöögi ohtu:

- Alati eemaldage seade vooluvõrgust pärast kasutamist.
- Mitte kasutada vesikeskkonnas viibides.
- Ärge asetage ega hoidistage toodet kohtades, kus see võib kukkuda või kust saab seda tõmmata kraanikaussi või vanni.
- Ärge asetage pumpa vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge haarake toodet, mis on vette kukkunud. Koheselt eemaldage toode vooluvõrgust.

- Kui toode on ühendatud vooluvõrku, siis ei tohi seda mingil juhul jätta järelvalveta.
- Kasutades toodet laste lähedal pidage hoolikat järelvalvet.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud lisaseadmeid.
- Mitte kunagi ärge kasutage toodet, mille toitejuhe või toitekaabel on kahjustunud ja kui toode on varasemalt kukkunud maha või vette ja sellest tingituna kahjustunud.
- Hoidke juhet eemal kuumutatud pindadest.
- Ärge kasutage toodet magades või uimases olekus.
- Ärge kukutage ega sisestage ühtegi objekti toote avadesse või torudesse.
- Ärge kasutage toodet kui see on katki või mõni selle osadest puudub.
- Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel mängida pumba seadmega, AC adapteriga jne.
- Ärge kasutage vahelduvvooluadapterit õues ega töötage sellega kohtades, kus kasutatakse aerosoolpihustavaid tooteid või kus manustatakse hapnikku.

Pakkematerjalid ei ole osa tootest. Lapse turvalisuse tagamiseks eemaldage ja visake ära kõik pakkematerjalid enne kasutamist ja säilitage kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks.

Säilitage kasutusjuhend ja kviitung hilisemaks kasutamiseks.

Hoiatus: Vähendamaks põletuste, elektrilöögi, tulekahju või vigastuste riski inimestele:

Sisukord:

Sisukord:.....	3
1. KIIRJUHEND	4
2. PUMP.....	4
2.1 Rinnapumba osad ja lisatarvikud.....	4
2.2 Puhastamise juhised.....	5
2.3 Rinnapumba koostamine.....	6
2.4 Rinnapumba kasutamine.....	6
2.7 Vigade otsimine.....	8
3. Rinnapiima säilitamise juhend.....	8
4. Lansinoh® pudel koos NaturalWave® lutiga.....	9
5. Tehnilised andmed.....	10
6. Klienditeenindus.....	10
7. Garantii.....	10

1. KIIRJUHEND

ÄRGE peske torusid ega pistikut.

Enne esimest kasutamist puhastage kõik osad, mis puutuvad kokku piimaga, vastavalt juhistele leheküljel 5, punkt 2.2.

Koostamine

Korrektse töötamise ja imemise jaoks on vajalik seadme nõuetekohane koostamine.



Sisestage lilla membraan nii, et jalad joonduvad väljalõigetega rinnapadjal



Kinnitage läbipaistev ka ja keerake nii, et toru ühendus oleks taga



Kinnitage rinnapadi



Sisestage klapp



Kinnitage pudel



Kinnitage toru



Kinnitage pistik



Kinnitage kaabel seadme külge




Kasutage Lansinoh® kompaktilist elektrilist rinnapumpa ainult koos rinnapiima ekspressioonikomplektiga.

Alustamine

Hoidke rinnapiima ekspresskomplekti (Breastmilk Expression Set) vastu rinda selliselt, et nibu ulatub otse rinnapadjas oleva nibu tunneli poole.

Veenduge, et rind täidaks täielikult rinnapadja selliselt, et moodustub vaakum ja õhku sisse ei pääse. Veenduge, et komplekt oleks veidi kallutatud allapoole, et piim saaks pudelisse voolata.



Laskuv ja ekspressioonifaasi (Let-down/Expression phases) kasutamine

- Pumba sisselülitamiseks vajutage toitenuppu , pump käivitub laskuv faasis. Laskuv faas kestab automaatselt 2 minutit.
- Alustamiseks ekspressioonifaasi varem, vajutage laskuv/ekspressioon ümberlülitamise nuppu , et liikuda ekspressioonifaasi. Vajutage  taaskord suvalisel ajahetkel, et lülitada tagasi laskuvasse faasi.
- Let-Down Phase (laskuv faas) on kiirem pumpamisstiil, mis jälgendab lühikest ja kiiret imemist, mida teie laps kasutab piimavoolu algatamiseks.
- Ekspressioonifaas jälgendab aeglasemat, sügavamat imemist, 5 kohandatava imemisastmega, mida saab vastavalt mugavusele kohandada.
- Rinnapumbal on LED lamp lilla klahvistiku all, näitamaks kasutusel olevat seadistust.

2. PUMP

2.1 Rinnapumba osad ja lisatarvikud

Rinnapumba seade

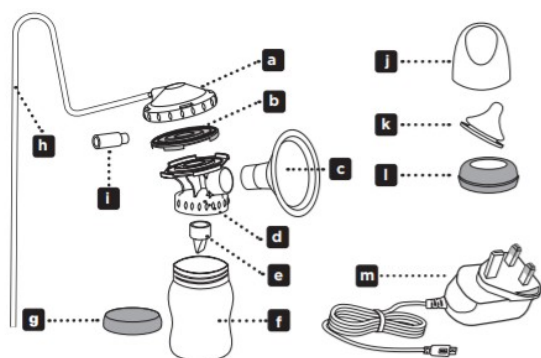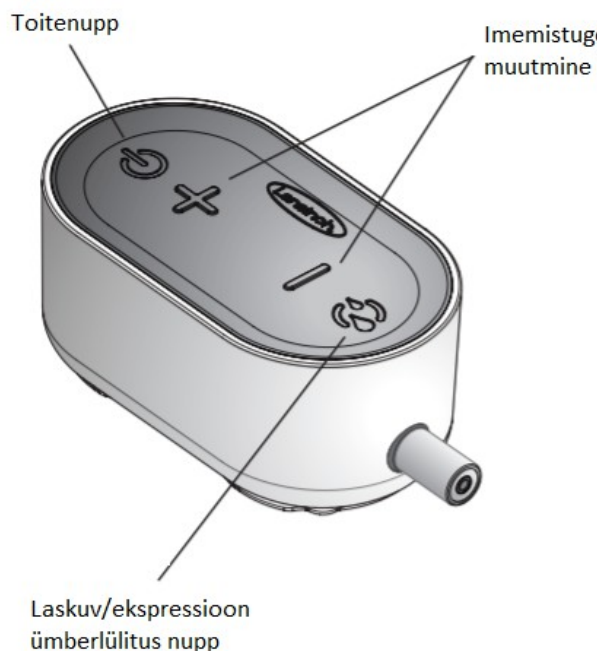

Rinnapiima ekspresskomplekt		Tootenumber
a	Membraani kate	P53410
b	Membraan	P53402
c	ComfortFit® rinnapadi (25mm)	P54103
d	Rinnapadja korpus	P53454
e	Valge ventiil	P53401
f	160ml (5oz) pudel	P53451
g	Kork	P53461
Rinnapumba osad ja lisad		Tootenumber
h	Silikoon toru (800mm)	P54100
i	Pumba ühendus	P54106
j	Luti kate	P53462
k	NaturalWave® aeglase vooluga lutt	P75900
l	Luti krae	P53463
m	AC adapter	P53470

2.2 Puhastamise juhised

Kui tervishoiutöötaja ei ole juhendanud teist, siis järgige järgnevaid juhiseid.

ÄRGE peske torusid ega pistikut.

Enne esimest kasutamist

- Enne rinnapiima ekspresskomplekti käsitsemist alati pese käed seebi ja veega ning kuivata hoolikalt.
- Võtke rinnapiima ekspresskomplekt koost lahti ning asetage tootesad suurde potti.
- Katke tootesad veega ja veenduge, et oleks piisavalt ruumi esemetel vabalt potis hõljuda.
- Soojendage vesi keemistemperatuurini ja jätke seadme osad keema 5 minutiks.
- Pärast keetmist eemaldage osad tangidega potist ja asetage osad hoolikalt puhtale paberrätikule või puhtale kuivatusrestile ja lubage õhu käes kuivada.
- Enne toote koostamist ja kasutamist laske toote osadel täielikult kuivada. Osaliselt kuivatatud osad võivad mõjutada pumba tööd.
- Kui osad on kuivanud, saab neid hoiustada puhtas kaanega varustatud plastikvannis või puhtas tõmbelukuga kotis.

Enne igat pumpamise seansi

- Enne rinnapiima ekspresskomplekti käsitsemist alati pese käed seebi ja veega ning kuivata hoolikalt.
- Enne rinnapiima ekspresskomplekti koostamist olge veendunud, et kõik toote osad oleksid täielikult kuivanud.
- Kontrollige visuaalselt üle, et üksikutele komponentidel ei oleks pragusid, lõikeid, rebendeid, värvimuutusi või vananemismärke, need võivad pumba funktsiooni mõjutada.
- Kui Teil peaks tekkima küsimusi või muresid toote osade kohta, siis külastage www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee või helistage **Eestis +372 555 23 260**.

Puhastamine iga pumpamise seansi järgselt


- Võtke rinnapiima ekspresskomplekt koost lahti, asetades kõrvale seadme torud ja pistiku.
- Kohe pärast kasutamist loputage kõik osad külma veega. Asetage pumba osad pesukaussi, mis on mõeldud ainult imiku toitmiseseadmete pesemiseks. Ärge asetage pumba osasid otse kraanikaussi, sealolevad mikroobid võivad saastada pumba.
- Pese käsitsi kõik rinnapiima ekspresskomplekti osad kasutades sooja seebivett.
- Luti harja võite kasutada tugevate plastikust osade pesemiseks, kuid ärge kasutage seda valge ventiili või membraani pesemiseks.
- Loputage osad voolava, sooja ja puhta vee all või kasutage vett, mis on imikute

toitmisseadmete pesemiseks mõeldud pesukaasis.

- Asetage osad potti ning katke veega veendudes, et kõigil osadel on ruumi potis vabalt hõljuda.
- Soojendage vesi keemistemperatuurini ja jätke seadme osad keema 5 minutiks.
- Pärast keetmist eemaldage osad tangidega potist ja asetage osad hoolikalt puhtale paberrätikule või puhtale kuivatusrestile ja lubage õhu käes kuivada. Ärge hõõruge ega patsutage esemeid kuivaks käterätikuga, see võib esemele viia mikroobe.
- Enne toote koostamist ja kasutamist laske toote osadel täielikult kuivada. Osaliselt kuivatatud osad võivad mõjutada pumba tööd.
- Kui osad on kuivanud, saab neid hoiustada puhtas kaanega varustatud plastikvannis või puhtas tõmbelukuga kotis.
- Puhastage pesukauss, pudel ja/või lutihari pärast igat kasutuskorda.
- Pärast igat kasutuskorda tuleb pump puhtaks pühkida puhta paberrätikuga või pehme riidega. Pumba ei tohi kunagi asetada puhastamiseks vette või muudesse vedelikesse.

Toote osasid saab puhastada aurus või mikrolainetega steriliseerijas, Järgige kindlasti tootja juhiseid.

2.3 Rinnapumba koostamine

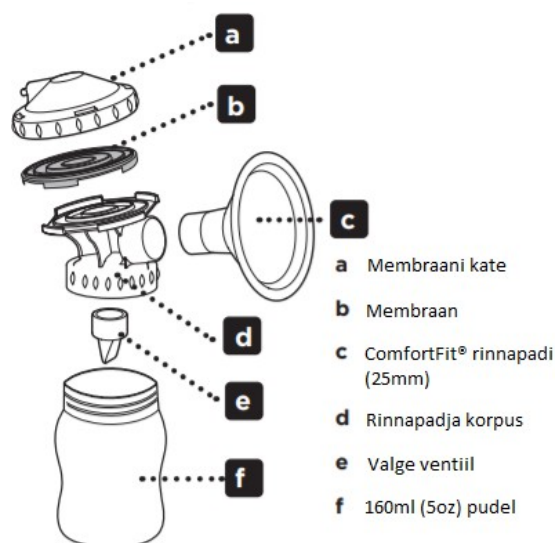

2.4 Rinnapumba kasutamine

Lansinoh® kompakset elektrilist rinnapumpa on väga lihtne kasutada, pakkudes erinevaid seadistusi, mida saab ise muuta, et maksimeerida mugavust ja piima tootmist.

Laskuv ja ekspresioonifaas

Kui imikud imetavad rinda, alustavad nad kiire imemisega, et stimuleerida teie piima liikumist ja voolamist. Kui teie piim on hakanud voolama, tõmbab laps piima välja aeglasema, sügavama imemisega. Selle loodusliku rütmi stimuleerimiseks pakub Lansinoh® kompaktne ühekordne elektriline rinnapump 2 faasi- laskuv faas ja ekspresioonifaas.

- Let-Down Phase (laskuv faas) on kiirem pumpamisstiil, mis jälgendab lühikest ja kiiret imemist, mida teie laps kasutab piimavoolu algatamiseks.
- Ekspresioonifaas jälgendab aeglasemat, sügavat imemist, 5 kohandatava imemisastmega, mida saab vastavalt mugavusele kohandada.

Lülitit kahe faasi vahel saab hõlpsasti juhtida kasutades laskuva/ekspresioon faasi vahetuse



nuppu . Laskuvfaas tuvastatakse klahvistikul aeglase tuhmide LED tuledega. Ekspresioonifaas tuvastatakse klahvistikul liikumatu LED tuledega.

Kui pump on sisselülitatud, käivitub see laskuv faasis ning lülitub automaatselt 2 minuti möödudes ekspresioonifaasi. Kui piim hakkab voolama enne 2 minuti möödumist, saate alati minna ise üle



ekspresioonifaasi vajutades nuppu. Saate alati tagasi minna laskuvasse faasi vajutades taaskord







nuppu.

Rinnapumba kasutamine

- Veenduge, et rinnapump on korrektselt puhastatud. Peske käed hoolikalt ja veenduge, et rinnad on puhtad.
- Veenduge, et rinnapump ja rinnapiima ekspreskomplekt on korrektselt kokku pandud ja silikoon toru on kindlalt pumba külge ühendatud toru liitmiku ja membraan katte kaudu.
- Hoidke rinnapiima ekspreskomplekti vastu rinda selliselt, et nibu ulatub otse ComfortFit® rinnapadja poole.
- Veenduge, et rind täidaks täielikult ComfortFit® rinnapadja selliselt, et moodustub vaakum ja õhku sisse ei pääse.
- Rinnapiima ekspreskomplekt ja nibutunnel peavad olema veidi kallutatud allapoole, et piim saaks pudelisse voolata.
- Pumba käivitamiseks vajutage ja hoidke all

mõned sekundid sisse/välja (on/off) nuppu.

- Rinnapump käivitub alati laskuva faasi 3-ndas tasemes ja lülitub automaatselt 2 minuti möödudes ekspressioonifaasi. Kui piim hakkab voolama enne 2 minuti möödumist, saate alati minna ise üle ekspressioonifaasi vajutades  nuppu. Saate alati tagasi minna laskuvasse faasi vajutades taaskord  nuppu.
- Imemistaset saate suurendada vajutades  nuppu. Imemistaseme vähendamiseks vajutage  nuppu. Sõltuvalt valitud imemistasemest, põleb maksimaalselt 5 LED lampi.
- Märkus: kui pumbaseade jäetakse töötama ja järelvalveta rohkemaks kui 60 minutiks, lülitub see automaatselt välja.


Vooluallikad

Rinnapumpa võib kasutada järgnevate vooluallikatega:

- AC adapter
Ühenda adapter ühenduspesasse, mis asub seadme sisse/välja nupuga samal küljel. Sisesta AC adapter vooluvõrku. Elektriline ohutus saavutatakse ainult juhul, kui seade on ühendatud kaasa tulnud tootjapoolse AC adapteriga (vaata peatükki "Tehnilised andmed").
- Akupank (ei kuulu komplekti)

Ühenda akupank USB kaabli abil seadme ühenduspesasse, mis asub seadme sisse/välja nupuga samal küljel. Elektriline ohutus saavutatakse ainult juhul, kui seade on ühendatud akupanga poolt täpsustatud vooluallikaga (vaata peatükki "Tehnilised andmed").

2.5 Rinnapadja suuruse seadistamine

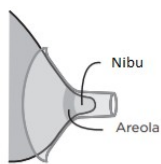

Rinnapiima pumbates peaks rinnapadja avas olema ainult rinnanibu ja väike osa areolast. Kui suur osa areolast on avas, siis viitab see sellele, et rinnapadi on liiga suur ja Teil on vaja väiksemat suurust.

Pumpamise käigus peaks Teie rinnanibu takistusteta avast sisse ja välja liikuma. Kui Te panete tähele, et nibu puutub või hõõrub vastu ava seinasid, siis viitab see sellele, et rinnapadi on liiga väike ja Teil on vaja suuremat suurust.

Pumbaga kaasa tulnud rinnapadi on 25 mm. 30,5 mm suurune ComfortFit® rinnapadi on saadaval

aadressil www.lansinoh.co.uk,
www.relaxmom.ee, telefoni number Eestis +372 555 23 260.

Pumpamise näpunäited

Rinnapiima valmistatakse nõudluse ja pakkumise järgi. Regulaarne rinnapiima pumpamine stimuleerib Teie keha ja aitab säilitada Teie rinnapiima varu. Kui Teil on mõni küsimus rinnaga toitmise või rinnapumba kohta, siis võtke ühendust rinnaga toitmise nõustaja või mõne muu tervishoiutöötajaga nagu teie ämmaemand või koduõendus spetsialist.

Soovitused pumpamiseks

- Aseta ennast enne rinnapiima pumpamist mugavalt sisse ja hoia pump enda lähedal.
- Istu püstises asendis, et õlad ja käed oleksid korralikult toetatud.
- Eduka pumpamise aluseks on oskus kontrollida laskuva faasi refleksi, mis paneb rinnapiima vabalt voolama. Selle esilekutsumise aitamiseks võib enne pumpamist ja selle ajal rinna peal hoida soojakompressi ning õrnalt ringi-kujuliste liigutustega rinda masseerida. Selleks sobib soojendatud Lansinoh® Thera Pearl 3-in-1 rinnakompress.
- Kui Te ei ole oma lapsega antud hetkel koos, siis vaadake temast mõnda pilti või videot, või hoidke enda lähedal mõnda eset, millel on Teie lapse lõhn, sest need võivad kaasa aidata laskuva faasi esilekutsumiseks.
- Kui teie laps on teiega, siis nahk-naha vastu kontakt ja lapse lõhn aitavad kaasa rinnapiima laskuva faasi esilekutsumisele. Te võite rinnapiima pumbata ühest ja last toita teisest rinnast samaaegselt, sest see lubab teil maksimeerida pumpamise efektiivsust, kuna teie lapse imemine aitab esile kutsuda ka teise rinna laskuvat faasi.
- Varuge pumpamiseks piisavalt aega. Stress võib piima tootmist vähendada.
- Jooge piisavalt vett; klaas vett enne ja pärast igat sessiooni on oluline piima tootmiseks.
- Paljud emad on leidnud, et neil on hommikul pärast ärkamist suurem piima varu, mistõttu võite proovida hommikul pumpamist.
- Mõned emad suudavad esile kutsuda rohkem, kui ühe laskuva faasi pumpamise kohta. Te võite saavutada teise, liikudes tagasi laskuvasse faasi vajutades laskuva faasi/ekspressiooni faasi ümberlülitus nuppu.
- Jälgige oma rinnaga toitmise ja pumpamise aegu ning kestuseid ning ka piima koguseid mõlema rinna kohta. Nende andmete abil on Teil võimalik leida enda jaoks optimaalne rutiin imetamiseks ja pumpamiseks. Probleemide korral võib abi olla tervishoiutöötaja poole pöördumisest.

- Aja säästmiseks ja segaduste ning piima maha mineku vältimiseks pumbake piim otse Lansinoh® rinnapiima säilituskottidesse. Veenduge, et teie Lansinoh® rinnapiima säilituskotil on valged ja lillad lilled ning valge joon logo kohal. Kui teie kotil ei ole sellist kujundust, siis see ei ühildu pumbaga, et piima otse kotti pumbata. MÄRKUS: Otse kotti pumpamisel on rinnapiima säilituskoti ohutuks eemaldamiseks vaja kasutada kahte kätt. Külstage veebilehte www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee, et teada saada rohkem.

	<p>ekspresskomplekt on korrektselt kokku pandud. Kontrollige koostamisinfot punktis 2.3, leheküljel 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et kõik ühendused (eriti torude) on turvalised. Veenduge, et rinnapadi on tihedalt rinna ümber. Kontrollige ega valgel ventiilil ei oleks rebendeid ega torkejälgi. See osa pumbast on väga tähtis korralliku imemise saavutamiseks. Asendage kahjustunud ventiil varuventiiliga, mis tuli tootega kaasa.
Ma kogemata pesin torusid	Kui märkate kondenseerumist või midagi, mis võib olla hallitunud, visake torud ära ja võtke ühendust meie klienditeenindus meeskonnaga uue osa väljavahetamiseks.

2.7 Vigade otsimine

Probleem	Lahendus
Pump ei lähe tööle	<p>Kui Teil tekib probleeme elektri ja/või pumba mehaanilise funktsioneerimisega, käituge järgnevalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, et AC adapter või akupank on korrektselt ühendatud pumbaga. Kui Te kasutate AD adapterit, siis ühendage see vooluvõrgust lahti, oodake mõni sekund ning seejärel ühendage tagasi pistikupessa. Kui Te kasutate akupanka, tõmmake see pumbast välja, oodake mõni sekund ning seejärel ühendage taas pumbaga. <p>Kui Teil on täiendavaid probleeme, külstage www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee, helistage Eestis +372 555 23 260 edasiste juhiste saamiseks.</p>
Pumbates tunnen valu	<p>Rinnapadja vale suuruse korral võite tunda ebamugavust. Külstage www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee, helistage Eestis +372 555 23 260 edasiste juhiste saamiseks.</p>
Ma ei tunne imemist või imemine on väga madal	<p>Kui tunnete, et imemine on vähenenud, proovige järgnevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kui pump töötab, eemaldage torud membraani kattelt ja asetage sõrm torude liitmikule. Kui Te tunnete imemist, siis pump töötab korrektselt, aga rinnapiima ekspresskomplekt võib olla valesti kokku pandud või valge ventiil võib olla kahjustunud. Kui Te ei tunne imemist, proovige pumba vooluvõrgust eemaldamist, oodake mõned sekundid ja ühendage taas pistikupessa. Veenduge, et rinnapiima

3. Rinnapiima säilitamise juhend

Rinnapiima säilitamise ja sulatamise juhised ajalistele imikutele.

Võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga konkreetsete säilitamise juhendite jaoks. Kui Te sügavkülmutate rinnapiima, siis asetage need sügavkülma tagumisse osasse. Ärge asetage rinnapiima sügavkülma eesmisesse osasse, sest seal temperatuur võib kõikuda ukse avamisel ja sulgemisel. Enne ladustamist pange peale rinnapiima kuupäev ning kasutage esmalt kauem seisnud rinnapiima.

Piima säilitamise juhised (ajaliselt sündinud imikud)			
Kus	Temp	Aeg	Tegevus
Toatemperatuuril	60-80°F (19-26°C)	4h (ideaalne) kuni 6h (vastuvõetav)	Sisu peaks olema kaetud ja hoidma võimalikult jahedas; kattes anuma niiske rätikuga võib hoida piima jahedamana
Isoleeritud jahutuskotis	5-39°F (-15 - 4°C)	24h	Hoidke jääkotte pidevas kontaktis piima anumaga; piirake jahutuskoti avamisaega
Külmkapis	<39°F (<4°C)	4 päeva (ideaalne) kuni 5 päeva (vastuvõetav)	Hoidke piima külmkapi tagumises osas
Sügavkülmik	0°F (-18°C)	3 kuud (ideaalne) kuni 6 kuud (vastuvõetav)	Hoidke piima eemal sügavkülmiku seinadest ja pigem tagumises osas, kus temperatuur on
Sügavkülmik	-4°F (-20°C)	6 kuud (ideaalne) kuni 12 kuud	

		(vastuvõetav)	ühtlane
--	--	---------------	---------

Allikas: La Leche League International 2017

Need rinnapiima säilitamise juhised on soovitusel. Võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga või pöörduge oma riigi riiklike juhiste poole lisateabe saamiseks.

Rinnapiima sulatamine

Sulatage külmutatud piim külmkapis või asetage anum jaheda voolava vee alla, soojendades seda järk-järgult kuni piim on sulanud. Üles sulatatud piima võib hoida külmkapis kuni 24h.

ÄRGE külmutage juba varasemalt sulatatud piima.

Enne söötmist keerutage sulanud piima õrnalt, et üksteisest eraldunud kihid seguneksid taas. Rinnapiim ei ole homogeniseeritud ja "koor" tõuseb ülemistesse kihtidesse. Rinnapiima värvus ja konsistent võib varieeruda vastavalt sellele, mida sa varasemalt söönud oled, kui vana on laps pumpamise ajal ning päevast, mil piim väljutati. Edasise nõu saamiseks kontakteeruge tervishoiutöötajaga.

ÄRGE soojendage rinnapiima mikrolaineahjus!

Mikrolaineahjus piima soojendamine muudab piima koostist. Mikrolaineahi võib tekitada piimas "kuumasid kohtasid", mis võivad põletada imikut.

ÄRGE sulatage rinnapiima kuumas või keevas vees.

4. Lansinoh® pudel koos

NaturalWave® lutiga.

See on kliiniliselt tõestatud, et säilivad kindlaskujunenud imetamismustrid. Imetamine on soovitatud esimestel kuuel kuul imiku elus. Rinnaga imetamine peaks olema välja kujunenud, enne pudeli ja luti tutvustamist. Lansinoh® NaturalWave® lutt võimaldab imikul kasutada rinna juures õpitud söömisharjumusi.¹

1 * Woolridge et al, Key findings: "How Breast-fed Babies bottle-feed" Leeds Ultrasound Imaging Study 2 (LUIS-2) May 2011




Kinni haaramine: imiku huuled avanevad väljapoole ja kinnituvad areolale



Peristaltiline "lainetaoline" keele liikumine: keel liigub sujuvalt "lainetaoliste" liigutusega, et suruda nibu kokku ja väljutada piima. See stimuleerib loomulikku suu, lõua ja näo arengut



Neelamine: lapse keele tagaosaga tõuseb, suunates piima söögitorusse

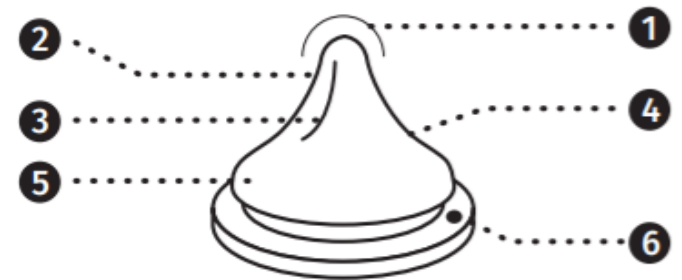

1. Luti tipp- imik kontrollib piima voolu
2. Eriti pehme, elastne silikoon- kohaneb imiku suulaega ja stimuleerib loomulikku keele liikumist
3. sisemised vertikaalsed servad- muudavad selle tugevaks ja ei lase kokku vajuda lutil
4. lai, kindel alus- hõlpsaks kinni haaramiseks ja turvaliseks tihendiks
5. Anti- colic õhuventilatsiooni süsteem- vähendab õhu hulka
6. ühes tükis lutt- lihtne kasutada ja puhastada

Kasutusjuhend

Täida pudel vajalikus koguses vedelikuga ja keerake kork kinni. Kuumutamine mikrolaineahjus ei ole soovitatav. Kui Te otsustate kuumutada toitu mikrolaineahjus, ärge sulgege pudelit. Kui Te kasutate mikrolaineahju, eemaldage lutt, krae ja kork. Enne kasutamist loksutage hoolikalt ja alati kontrollige temperatuuri enne lapsele pakkumist. Ebaühtlaselt kuumutatud toit võib last põletada.

TÄHTIS!

Ärge soojendage rinnapiima mikrolaineahjus, kuna see muudab piima koostist. Kaasas kandes täis pudelit, veenduge, et see kork oleks suletud. Jälgige, et lutt asetseks korgi keskel, et vältida lekkeid.

Puhastamine

Enne esimest kasutuskorda pange lutt, krae, kork ja pudel keevasse vette 5 minutiks. Laske jahtuda ja kuivada täielikult enne kasutamist. Enne igat

kasutuskorda peske lutt ja toote komponendid soojas seebivees. Loputage hoolikalt ja lubage kuivada. Puhastage enne iga kasutuskorda.

Koostamine

Kui osad on täielikult kuivad, sisestage toitmislutt läbi keeratava korgi krae. Kinnitage keeratava korgi krae turvaliselt pudeli kaelale. Kasutage ainult Lansinoh® NaturalWave® luttu koos Lansinoh® toitmispudeliga.



Ettevaatusabinõud

Kui Te ei kasuta toodet, hoidke seda kuivas ja kaetud kohas. Alati kasutage seda toodet täiskasvanu järelevalve all. Ärge puhastage, hoidistage ega lubage kontakti saada lahustitega või karmide kemikaalidega. Selle tagajärjeks võib olla toote kahjustumine. Ärge jätke toodet otsese päikesevalguse või kuumuse kätte. Ärge jätke toodet steriliseerivasse kohta rohkem kui soovitatud. Ärge soojendage vedelikku, asetades pudelit otse gaasi või elektriplaadile, soojendusplaadile, ahju jne.

HOIATUS oma lapse ohutuse ja tervise tagamiseks

Alati kasutage toodet täiskasvanu järelevalve all. Ärge kunagi kasutage toitmislutti tavalise lutina. Pidev ja pikaajaline vedelikku imemine võib põhjustada hammaste lagunemist. Alati kontrollige toidu temperatuuri enne toitmist. Hoidke toote osasid, mida ei kasuta, lastele kättesaamatus kohas. Ärge jätke last üksi joogivarustusega, et vältida lämbumisohtu kui imik kukub või toode on koost lahti võetud. Kui märkate luti kahjustumist või nõrgenemist, visake lutt minema. Ohutuse ja hügieeni huvides soovime vahetada luttu iga 7 nädala järel.

5. Tehnilised andmed

Vooluallikas

Kasutades AC adapterit: 100V/240V AC tüüpi adapteriga seinapistik, galvaaniliselt isoleeritud koos 5V DC väljundvooluga. Pumba võimsuse kadu: Maksimaalselt 10 vatti (W). Pinge reguleerimine: Madala väljalangemispingega lineaar regulaator ja lühise kaitse.

Kasutades akupanka: Lubatud on kasutada CE märgistusega 5V/2A akupanka.

Juhtimissüsteem

Juhtimissüsteem: Sisemälu mikrokontroller.


Sisemälu: 8K flash ROM, 1K RAM mälu.

Tööprogrammideks on kaks faasi: laskuv faas ja ekspressiooni faas on valitavad klahvistikult.

Muudetav imemistugevus: Klahvistiku abil on võimalik muuta ja kontrollida 5 imemistugevuse taset.

Imemisvaakumi tase: Minimaalselt 50 mmHg, maksimaalselt 250 mmHg.

Nõuete järgimine

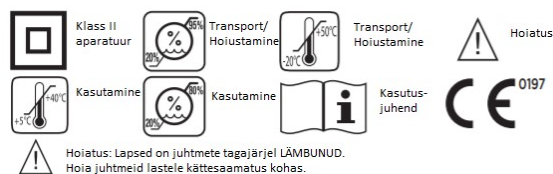

Simsukian adapter: Olemasolev CE sertifikaat Euroopa turu jaoks.

6. Klienditeenindus

Lansinoh on siin, et teid aidata Teie rinnaimetamise teekonnal, küsimuste korral **külastage palun www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee Eestis helistage +372 555 23 260.**

7. Garantii

Piiratud tarbekaupade garantii

Seadme garantii kehtib ainult seadme algsele ostjale ja kaitseb materjalidefektide ning kaubanduslikult vastuvõetamatute kvaliteedivigade eest pumba mehhanismi korral 2 aastat ja ülejäänud seadme osadele 90 päeva. Garantii kaitse katkestatakse seadme müügi või andmise korral teisele inimesele. See garantii annab Teile konkreetseid seaduslikud õigused ja sõltuvalt asukohast võivad Teil olla veel ka muud õigused.

LANSINOH EI VÕIMALDA SEADMELE ÜHTEGI TEISTSUGUST GARANTIID, PEALE SELLE, MIS ON SELGELT SIIN ESILE TOODUD. KÕIK KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD KÕIK KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE OSAS VÕI KÕIK KAUDSED GARANTIID SEADME SOBIVUSE OSAS KINDLAKS OTSTARBEKS, ON SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES PIIRATUD 90-PÄEVASE PERIOODIGA ALATES ALGSE OSTJA OSTUST.

Juhul, kui Lansinoh® leiab, et toode ei vasta ülaltoodud piiratud garantii tingimustele, siis ostja

ainsa ja ainuõigusliku abinõuna ei paranda või, Lansinoh®-i soovi korral, vaheta Lansinoh® seda seadet tasu eest ega võta lisatasu varuosade või tehtud töö eest.

MÄRKUS: Ostja peab kandma kõik toote Lansinoh-ile tagastamisega seotud kulud. See garantii ei kehti seadmetele, millel on märke mitte sihtotstarbe pärast kasutamisest, väärkasutusest või muudatustest seadmel. Lansinoh-i rinnaga toitmise toodete puhul on soovitatud kasutada ainult Lansinoh-i varuosi ja lisasid. Vale- või mitte sobiva hoolduse või remondi korral või mitte kasutades Lansinoh-i varuosi või lisasid võib garantii olla kehtetu.

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI OLE LANSINOH VASTUTAV ÜHEGI JUHUSLIKU VÕI PÕHJUSLIKU KAHJU EEST KAASA ARVATUD, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDAMISE MAKSUMUSEGA, MIS ON PÕHJUSTATUD MISTAHES KIRJUTATUD VÕI KAUDSETE GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEGA.

Kui te soovite esitada nõuet garantii nõuet, palun helistage **Eestis +372 555 23 260**, või võtke ühendust oma riigi edasimüüjaga. Teile antakse aadress, kuhu te saate vajadusel tagastada toote koos originaal arvega või mõni muu kuupäevaga ostu tõendav dokument ja probleemi lühikirjeldus.

Elektromagnetilise ühilduvuse deklaratsioon (EMC)

Ainult informatsiooniks.

FCC (Federal Communications Commissions) avaldus

See seade vastab FCC 15 reeglile.

Töötamine toimub kahel järgneval tingimusel: (1) See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) see seade peab aktsepteerima kõiki saadud häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada soovimatut tööd.

Juhtmevaba tehnika mõju

Traadita side seadmed nagu näiteks traadita koduvõrgu seadmed, mobiiltelefonid, juhtmeta telefonid ja nende tugijaamad, raadiosaatjad võivad mõjutada seda varustust ning neid tuleks hoida vähemalt 3,5m kaugusel antud seadmest.

Hoiustamine

Seda seadet ei tohiks kasutada kõrvuti või hoiustada teiste seadmetega. Kui seadme hoiustamine või kõrvuti panemine teiste seadmetega on vajalik, siis peaks seadet jälgima, et tagada normaalset kasutust seadmes, mida kasutatakse.

See toode on isiklik hügieeni toode, mistõttu ei saa seda tagastada pärast paki avamist. Kui Teil on probleeme tootega, helistage **Eestis +372 555 23 260**, või võtke ühendust oma riigi edasimüüjaga.

Meie klienditeeninduse meeskond aitab Teid alati hea meelega.

Soovituslik vahemaa kaasaskantavate ja liikuvate raadiolaine (edaspidi RF) sideseadmete ja pumba vahel @3Vrms (ruutkeskmistatud pinge)

Lansinoh® elektriline rinnapump on mõeldud kasutamiseks kontrollitud raadiolainete häiretega elektromagnetilises keskkonnas. Lansinoh® elektrilise rinnapumba klient või kasutaja saab aidata vähendada elektromagnetilisi häireid hoides minimaalset vahemaad Lansinoh® elektrilise rinnapumba ja kaasaskantavate ning liikuvate RF sideseadmetega, nagu on soovitatud järgnevas tabelis. Vahemaa on antud sideseadme maksimaalse väljundvõimsuse järgi.

	Eraldus vahemaa (m) saatja sageduse järgi		
Saatja arvestuslik maksimaalne väljundvõimsus (W)	150 kHz - 80 MHz	80 MHz - 800 MHz	800 MHz - 2,5 GHz
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,36
100	11,67	11,67	23,33

**Tootja: LANSINOH LABORATORIES SAG.
GEREC. TAS. SAN. TIC. LTD. STI.**

**Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B 35410
Gaziemir - Ismir - Turkey**

Lansinoh' Laboratories, Inc. Jason House, Kerry
Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.

lansinoh.co.uk

Turustaja.: Relaxmom OÜ :

Liivalaia 28-60 Tallinn Estonia

www.relaxmom.ee

Info: Tel. +372 555 23 260

Lansinoh on Lansinoh-i registreeritud kaubamärk.

Laboratories, Inc. ©2018 Lansinoh Laboratires, Inc.
Kõik õigused kaitstud.

Kasutusjuhendi avaldamise kuupäev: **18.02.2020**